

Aurum2

avec du Miel de Manuka



Présentation de la gamme Aurum[®] 2



Innovators in Stomacare



avec du Miel de Manuka

La nouvelle gamme Aurum®2 de protecteurs cutanés, de poches de colostomie, d'iléostomie et d'urostomie pour les systèmes deux pièces offre de nouvelles améliorations afin de contribuer à une meilleure qualité de vie des personnes portant une stomie à travers le monde.

L'une des principales nouveautés de la gamme Aurum®2 est l'ajout de miel de Manuka pour applications médicales à notre hydrocolloïde doux Hyperflex® pour aider à garder une peau saine autour de la stomie.

Les avantages en bref...

Confiance

Sécurité améliorée

Le double système de sécurité innovant permet de fixer la poche à la fois avec un raccord souple et un anneau adhésif

Moins de fuites

Le filtre Dual-Carb®i (iléostomie) comprend une nouvelle structure en carbone et une membrane en PTFE résistante aux liquides et aux corps gras

Confort

Hypoallergénique

L'hydrocolloïde Hyperflex® de Welland Medical, enrichi en miel de Manuka, respecte même les peaux les plus sensibles, tests à l'appui. Ses composants naturels aident à réduire les irritations cutanées

Moins de ballonnements

Une meilleure désodorisation et moins de ballonnements avec le nouveau filtre Dual-Carb®2 (colostomie)

Soin

Retrait en douceur

La poche se retire facilement du protecteur grâce à sa languette facile à manipuler

La languette easy2peel™ sert à enlever en douceur le protecteur posé sur la peau en limitant les traumatismes cutanés lors du changement.

Pourquoi le miel de Manuka ?

Le miel de Manuka est un produit pur et naturel issu exclusivement du nectar de la fleur de Manuka, en Nouvelle-Zélande. L'historique des recherches démontre que ce type de miel actif a pour propriétés d'éliminer les bactéries, de supprimer les inflammations et de stimuler la croissance des cellules, ce qui peut favoriser le processus de guérison.




Colostomie

La nouvelle gamme de poches fermées Aurum®2 est dotée d'une fenêtre qui permet une installation facilitée de la poche et un contrôle de la stomie. Le nouveau filtre Dual-Carb®2 est spécialement pensé pour les patients colostomisés.

Aurum®2 Colostomie : Principaux avantages

- Hydrocolloïde doux Hyperflex® incluant du miel de Manuka
- Une meilleure désodorisation et moins de ballonnements avec le filtre Dual-Carb®2
- Différentes tailles d'anneaux et de poches sont disponibles avec des protecteurs plats ou convexes pour répondre aux besoins de chacun
- Moins de traumatismes cutanés, une faible pression suffisant à attacher la poche au protecteur en toute sécurité
- Confiance accrue grâce au double système de sécurité consistant à fixer la poche au moyen d'un raccord souple et d'un anneau adhésif
- Mise en place et contrôle de la stomie simplifiés grâce à la fenêtre
- Réduction des traumatismes cutanés avec la languette easy2peel™ qui permet de retirer le protecteur en douceur
- Changement de poche simple et rapide grâce à la languette de retrait facile à manipuler
- Un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé, grâce au revêtement imperméable très doux et à séchage rapide
- Réduction des irritations cutanées et du risque de fuites, le guide de découpe permet une adaptation parfaite aux différentes tailles et formes de stomies

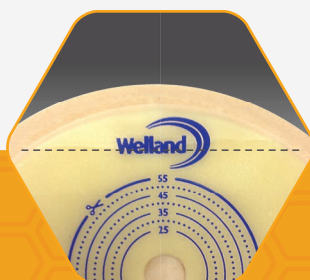




NOUVEAU Filtre Dual-Carb® 2

Fonctionnement

La formule améliorée en carbone du nouveau filtre Dual-Carb® 2 augmente l'absorption des odeurs pour une meilleure désodorisation et sa perméabilité accrue aide à réduire les ballonnements.

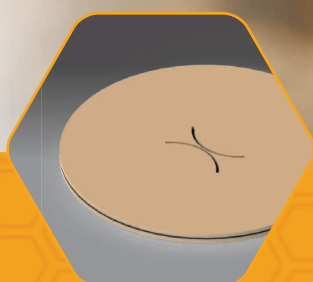

Aurum2 
avec du Miel de Manuka

Iléostomie

La nouvelle gamme de poches vidables Aurum®2 est dotée d'une fenêtre qui permet une installation facilitée de la poche. Le nouveau filtre Dual-Carb®i est spécialement pensé pour les patients iléostomisés.

Aurum®2 Iléostomie : Principaux avantages

- Hydrocolloïde doux Hyperflex® incluant du miel de Manuka
- Risque de fuites réduit car le filtre Dual-Carb®i (iléostomie) résiste aux liquides et aux corps gras
- Différentes tailles d'anneaux et de poches sont disponibles avec des protecteurs plats ou convexes pour répondre aux besoins de chacun
- Moins de traumatismes cutanés, une faible pression suffisant à attacher la poche au protecteur en toute sécurité
- Confiance accrue grâce au double système de sécurité consistant à fixer la poche au moyen d'un raccord souple et d'un anneau adhésif
- Réduction des traumatismes cutanés avec la languette easy2peel™ qui permet de retirer le protecteur en douceur
- Vidage et nettoyage simplifiés avec le système de fermeture intégrale innovant de Welland Medical
- Un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé, dû à l'habillage imperméable très doux à séchage rapide
- Mise en place et contrôle de la stomie simplifiés grâce à la fenêtre
- Changement de poche simple et rapide grâce à la languette de retrait facile à manipuler
- Réduction des irritations cutanées et du risque de fuites, le guide de découpe permet une adaptation parfaite aux différentes tailles et formes de stomies.




NOUVEAU filtre Dual-Carb® i

Fonctionnement

Le filtre Dual-Carb® i (iléostomie) est doté d'une nouvelle structure en carbone laissant une plus grande surface au carbone, ce qui permet la libre circulation de l'air et l'élimination des odeurs.

Une caractéristique essentielle du filtre est la membrane en PTFE résistante aux liquides et aux corps gras, qui diminue le risque de fuites.

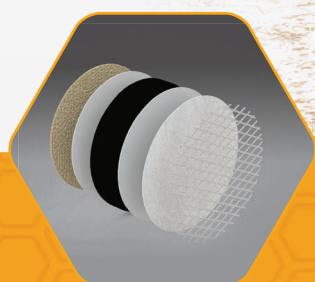

Urostomie

Portez votre poche en toute confiance et poursuivez vos activités quotidiennes grâce à la gamme de produits d'urostomie Aurum®2.

Dotée de nouvelles améliorations, Aurum®2 inclut du miel de Manuka dans notre hydrocolloïde doux Hyperflex® et s'enrichit d'un nouveau protecteur convexe, idéal pour les patients ayant une stomie mal située, dans un pli ou rétractée.

Aurum®2 Urostomie : Principaux avantages

- Hydrocolloïde doux Hyperflex® incluant du miel de Manuka
- Différentes tailles d'anneaux et de poches sont disponibles avec de nouveaux protecteurs plats ou convexes pour répondre aux besoins de chacun
- Poche moins large en raison du système de vidange amélioré
- Moins de traumatismes cutanés, une faible pression suffisant à attacher la poche au protecteur en toute sécurité
- Confiance accrue grâce au double système de sécurité consistant à fixer la poche au moyen d'un raccord souple et d'un anneau adhésif
- Risque d'infection réduit car la valve anti-reflux empêche l'urine de refluer
- Mise en place et contrôle de la stomie simplifiés grâce à la fenêtre
- Réduction des traumatismes cutanés avec la languette easy2peel™ qui permet de retirer le protecteur en douceur
- Changement de poche simple et rapide grâce à la languette de retrait facile à manipuler
- Un confort exceptionnel, même en cas de port prolongé, grâce au revêtement imperméable très doux et à séchage rapide
- Confort accru grâce au robinet universel et souple



NOUVEAU
Protecteur
convexe pour
urostomie



Aurum2 
avec du Miel de Manuka

Codes produit

Poches de colostomie pour deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./ emb.	Taille de la poche	Taille de l'anneau	Couleur
XMH2C445	30	Mini	45 mm	Beige
XMH2C545	30	Midi	45 mm	Beige
XMH2C145	30	Maxi	45 mm	Beige
XMH2C455	30	Mini	55 mm	Beige
XMH2C555	30	Midi	55 mm	Beige
XMH2C155	30	Maxi	55 mm	Beige
XMH2C570	10	Midi	70 mm	Beige
XMH2C170	10	Maxi	70 mm	Beige



Poches d'iléostomie pour deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./ emb.	Taille de la poche	Taille de l'anneau	Couleur
XMH2D445	30	Mini	45 mm	Beige
XMH2D545	30	Midi	45 mm	Beige
XMH2D145	30	Maxi	45 mm	Beige
XMH2D455	30	Mini	55 mm	Beige
XMH2D555	30	Midi	55 mm	Beige
XMH2D155	30	Maxi	55 mm	Beige
XMH2D570	10	Midi	70 mm	Beige
XMH2D170	10	Maxi	70 mm	Beige



Poches d'urostomie pour deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./ emb.	Taille de la poche	Taille de l'anneau	Couleur
XMH2U545	10	Midi	45 mm	Beige
XMH2U145	10	Maxi	45 mm	Beige
XMH2U555	10	Midi	55 mm	Beige
XMH2U155	10	Maxi	55 mm	Beige



Protecteurs plats pour deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./emb.	Taille de l'anneau	Taille de l'orifice
XMH2F413	5	45 mm	13-40 mm
XMH2F419	5	45 mm	19 mm
XMH2F422	5	45 mm	22 mm
XMH2F425	5	45 mm	25 mm
XMH2F429	5	45 mm	29 mm
XMH2F432	5	45 mm	32 mm
XMH2F435	5	45 mm	35 mm
XMH2F438	5	45 mm	38 mm
XMH2F513	5	55 mm	13-50 mm
XMH2F538	5	55 mm	38 mm
XMH2F544	5	55 mm	44 mm
XMH2F713	5	70 mm	13-65 mm



Protecteurs convexes pour deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./emb.	Taille de l'anneau	Taille de l'orifice
XMH2NF413	5	45 mm	13-25 mm
XMH2NF419	5	45 mm	19 mm
XMH2NF422	5	45 mm	22 mm
XMH2NF513	5	55 mm	13-35 mm
XMH2NF525	5	55 mm	25 mm
XMH2NF529	5	55 mm	29 mm
XMH2NF532	5	55 mm	32 mm
XMH2NF535	5	55 mm	35 mm
XMH2NF713	5	70 mm	13-48 mm



Protecteurs plats pour urostomie deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./emb.	Taille de l'anneau	Taille de l'orifice
XMH2UF413	5	45 mm	13-40 mm
XMH2UF419	5	45 mm	19 mm
XMH2UF422	5	45 mm	22 mm
XMH2UF425	5	45 mm	25 mm
XMH2UF429	5	45 mm	29 mm
XMH2UF432	5	45 mm	32 mm
XMH2UF435	5	45 mm	35 mm
XMH2UF438	5	45 mm	38 mm
XMH2UF513	5	55 mm	13-50 mm

Protecteurs convexes pour urostomie deux pièces Aurum®2

Code produit	Nb unit./emb.	Taille de l'anneau	Taille de l'orifice
XMH2NUF413	5	45 mm	13-25 mm
XMH2NUF419	5	45 mm	19 mm
XMH2NUF422	5	45 mm	22 mm
XMH2NUF513	5	55 mm	13-35 mm
XMH2NUF525	5	55 mm	25 mm
XMH2NUF529	5	55 mm	29 mm
XMH2NUF532	5	55 mm	32 mm
XMH2NUF535	5	55 mm	35 mm

Aurum2



avec du Miel de Manuka



Welland Medical Ltd., Hydehurst Lane, Crawley, West Sussex RH10 9AS Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 1293 615455 Fax : +44 (0) 1293 615411 E-mail : info@wellandmedical.com (société du groupe CliniMed)
Tous les produits marqués du symbole "Welland" et le logo Welland™ sont des marques commerciales de CliniMed (Holdings) Limited.

www.wellandmedical.com



INVESTORS
IN PEOPLE | Gold

